

WOZU LASERBESTRAHLUNG IN DER CHIRURGIE

- **Zur Beschleunigung der Wundheilung und Vermeidung von Heilungsstörungen** sowie zur Verringerung der Schmerzen nach allen operativen Eingriffen und Traumata
- **zur Verbesserung der Kallusbildung**
- **bei**
Decubitalulcera
Abszessen, Akneeffloreszenzen,
Phlegmonen, z.B. bei rezidivierenden Hohlhandphlegmonen,
Ulcera cruris,
Platzbauch,
Nervenläsionen
- **bei Verbrennungen**
(möglichst sofort bestrahlen - der übliche weitere Verlauf ändert sich und es kommt zu einer spontanen deutlichen Schmerzreduktion kurz nach der Bestrahlung sowie zu einer Abheilung oft ohne die übliche Blasenbildung, Entzündung, Infektion; zu erwarten ist eine wesentlich ästhetischere Vernarbung!)
- **zur Vermeidung von Abstoßungsreaktionen nach Hauttransplantationen**
- **postoperative Bestrahlung nach allen chirurgischen Eingriffen**
zur Erzielung ästhetischer Narbenbildung und zur Reduktion eventueller Komplikationen (Sekundärinfektionen); weniger Medikamente werden benötigt
- **bei passageren Anästhesien nach Operationen**
zur Unterstützung der Revascularisation und Reinnervation: Verbesserung der Einheilung der getrennten Nerven (Beschleunigung des Wachstums der Nervenenden, Ausrichtung der medialen Heilungskolben zum distalen Nervenende)
- **Reduktion der postoperativen Verweildauer im Krankenhaus**

WELCHER SOFTLASER FÜR OPTIMALE THERAPIE?

Benötigt wird ein Silberbauer Compact - Laser CL plus.

WIE GEHT MAN VOR?

- Bestrahlung der Wunde bzw. der schmerzhaften Stelle,
bei lokalen flächenhaften bzw. oberflächlichen Bestrahlungen mit 0,5 bis 1 Joule/cm²,
bei tieferliegenden Prozessen 1 -max. 4 J/cm², anfangs wenn möglich am besten 1x täglich
- Kombination mit Laserakupunktur (Schalterstellung Akupunktur, eventuell mit Leistungsreduzierspitze) möglich. Gute Wirkung z.B. bei Ulcera cruris mit lokalen lymphabflußfördernden Akupunkturpunkten.
- Bei Verwendung des Lasers zusätzlich zu homöopathischen Medikamenten zur Wundheilung wie Traumeel® erzielt man exzellente Ergebnisse.

Hinweise gemäß MPG: Kontraindikationen siehe Gebrauchsanweisung!
Für Verbraucher, die nicht zum medizinischen Fachpersonal zählen:
holen Sie sich den Rat eines Arztes, falls erforderlich!

Alle Angaben über Indikationen und Wirkungen basieren auf wissenschaftlichen Arbeiten oder sind aus der Fachliteratur, ohne Gewähr!