

WOZU LASERBESTRAHLUNG IN DER KOSMETISCHEN CHIRURGIE

- Zur Beschleunigung der Wundheilung und Vermeidung von Heilungsstörungen nach allen operativen Eingriffen
- Zur Vermeidung von Abstossungsreaktionen nach Hauttransplantationen
- Zur Verringerung der postoperativen Schmerzen
- Postoperative Bestrahlung nach allen chirurgischen Eingriffen
- Zur Erzielung schönerer Keloide und zur Vermeidung eventueller Komplikationen
- Bei passageren Anästhesien nach Operationen zur Unterstützung der Revascularisation

sowie bei

- Verbrennungen (möglichst sofort bestrahlen)
- Der übliche weitere Verlauf der Erkrankung ändert sich schlagartig und es kommt zu einer sofort einsetzenden Abheilung ohne die übliche Blasenbildung, Entzündung etc.!)
- Diffusen Abszessen
- Akneefloreszenzen

WELCHER SOFT - LASER FÜR OPTIMALE THERAPIE?

Benötigt wird ein Silberbauer CL plus Laser

WIE GEHT MAN VOR?

- Bei flächenhaften bzw. oberflächlichen Bestrahlungen 0,5 - 1 Joule/cm², bei tieferliegenden Prozessen 1 - 4 Joule/cm², anfangs zumindest 1x täglich
- Bestrahlung der Wunde bzw. der schmerzhaften Stelle
- ev. Kombination mit Körperakupunktur mit dem Laser

Hinweise gemäß MPG: Kontraindikationen siehe Gebrauchsanweisung!

Für Verbraucher, die nicht zum medizinischen Fachpersonal zählen:
holen Sie sich den Rat eines Arztes, falls erforderlich!

Alle Angaben über Indikationen und Wirkungen basieren auf wissenschaftlichen Arbeiten oder sind aus der Fachliteratur, ohne Gewähr!